


Logigramme de stérilisation et désinfection des dispositifs médicaux

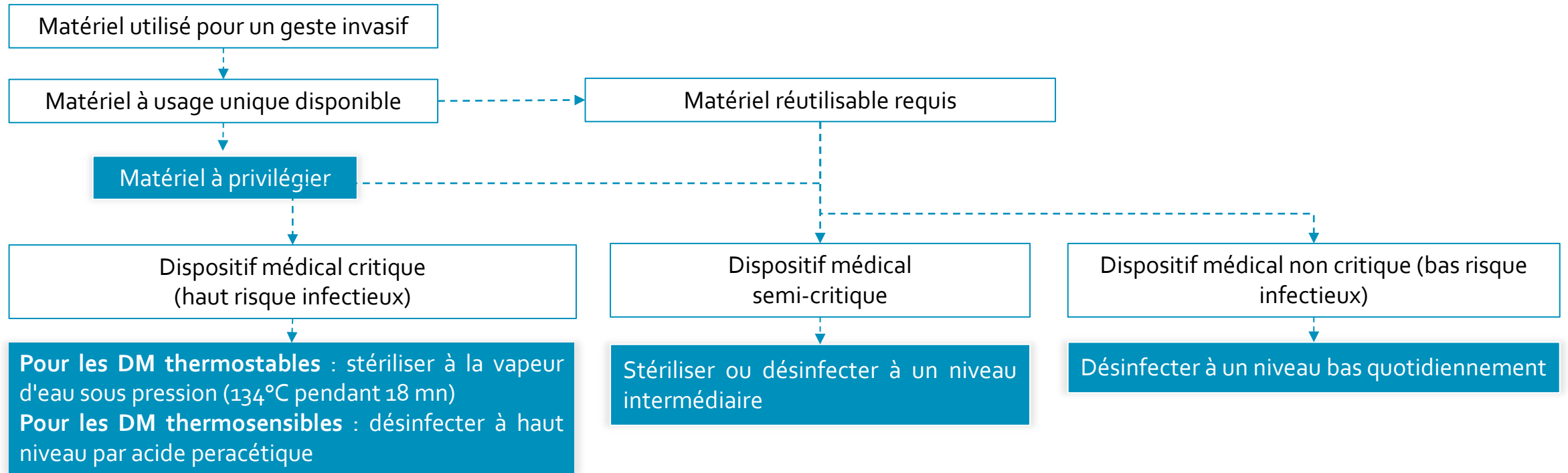

Niveau de désinfection	Produit désinfectant	Rinçage	Séchage
Bas niveau	Bactéricide par immersion ou application d'un support non tissé imprégné	Eau du réseau Gants à usage unique	Textile à usage unique non pelucheux
Niveau intermédiaire	Bain de produit désinfectant	Eau du réseau Gants à usage unique	Textile à usage unique non pelucheux
Haut niveau	Bain de produit désinfectant ou acide peracétique	Eau conditionnée étiquetée stérile en flacon + bac stérile Gants stériles	Textile à usage unique non pelucheux stérile