


Logigramme de stérilisation et désinfection des dispositifs médicaux

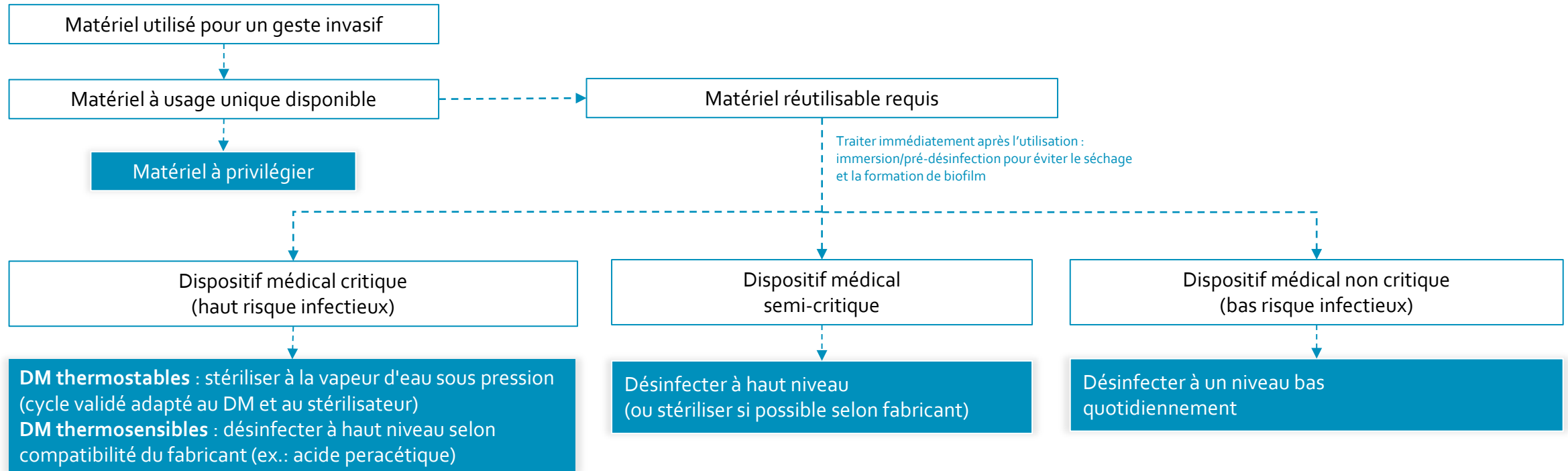

Niveau de désinfection	Produit désinfectant	Rinçage	Séchage
Bas niveau	Détergent-désinfectant de bas niveau	Eau du réseau Gants à usage unique	Textile à usage unique non pelucheux
Niveau intermédiaire	Bain de produit désinfectant de niveau intermédiaire	Eau du réseau ou eau stérile selon indication du fabricant Gants à usage unique	Textile à usage unique non pelucheux ou séchage par air filtré
Haut niveau (DM thermosensibles)	Désinfection chimique de haut niveau validée	DM thermosensible: eau stérile obligatoire Gants stériles	Essuyage avec compresse stérile ou séchage par air stérile
Haut niveau (DM thermostables)	Stérilisation à la vapeur d'eau sous pression	Non applicable	Stockage stérile en emballage fermé