


Logigramme de stérilisation et désinfection des dispositifs médicaux

Avant tout traitement du dispositif médical:

- Vérifier le statut du dispositif: usage unique ou réutilisable;
- Consulter les instructions du fabricant;
- Identifier le type de dispositif: critique / semi-critique / non critique.

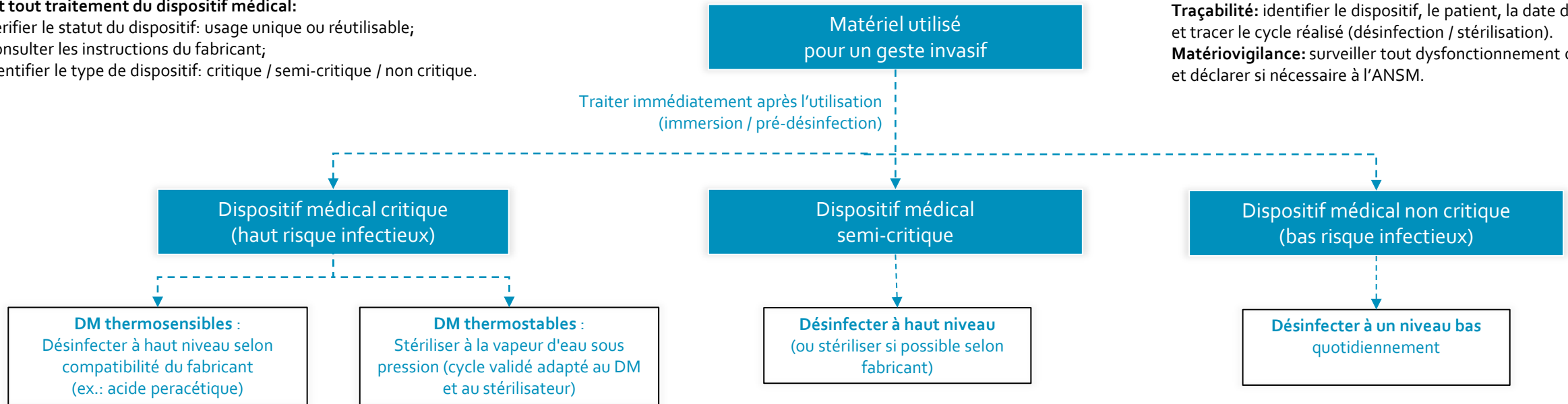

Traçabilité: identifier le dispositif, le patient, la date d'utilisation, et tracer le cycle réalisé (désinfection / stérilisation).

Matériorvigilance: surveiller tout dysfonctionnement ou incident et déclarer si nécessaire à l'ANSM.

Niveau de désinfection	Produit désinfectant	Rinçage	Séchage
Bas niveau	Détergent-désinfectant de bas niveau	Eau du réseau	Gants à usage unique Textile à usage unique non pelucheux
Niveau intermédiaire	Bain de produit désinfectant de niveau intermédiaire	Eau du réseau ou eau stérile selon indication du fabricant	Gants à usage unique Textile à usage unique non pelucheux ou séchage par air filtré
Haut niveau (DM thermosensibles)	Désinfection chimique de haut niveau validée DM thermosensible	Eau stérile obligatoire	Gants stériles Essuyage avec compresse stérile ou séchage par air stérile
Haut niveau (DM thermostables)	Stérilisation à la vapeur d'eau sous pression	Non applicable	Stockage stérile en emballage fermé